








<div></div> <div>Connexion s.a./n.v.</div> <div>Avenue Charles Woeste 207, B-1090 Brussels, Belgium</div> <div>T. +32 (0)2 421 71 40 F. +32 (0)2 425 77 47 E. mail@connexion.eu</div> <div>www.connexion.eu</div>	<div>CLIENT: ANSELL SWGBU</div>	<div>DATE: 09/04/14</div>	<div>COLOURS:</div>		
	<div>FILE NAME: Akuel SKYN Flatpack - Recto - IT PK</div>	<div><div><div></div><div></div></div><div>Process</div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div></div></div> <div><div></div><div>Pantone 7403</div></div>			

www.skyncondoms.com

IL PROFILATTICO DI NUOVA GENERAZIONE

- IL MATERIALE RIVOLUZIONARIO DEI PROFILATTICI SKYN OFFRE SENSAZIONI PIÙ NATURALI, PIÙ DELICATE E PIÙ INTENSE - CLINICAMENTE TESTATO-
- UNISCE L'ELEVATA RESISTENZA ALLA GRANDE SENSIBILITÀ TATTILE: LA SENSAZIONE DI NON INDOSSARE NIENTE
- IL GEL ULTRALUBRIFICANTE CON EFFETTO DI LUNGA DURATA RENDE IL RAPPORTO ANCORA PIÙ INTENSO
- TUTTI I PROFILATTICI SKYN SONO SOTTOPOSTI A TEST ELETTRONICO: MASSIMA PROTEZIONE

LA SENSAZIONE DI NON INDOSSARE NIENTE



SCOPRI ANCHE
SKYN® CON
PUNTEGGIATURA
INTENSAMENTE!



1



2



3



4

1. Aprire con attenzione l'involucro ed estrarre il profilattico. Prestare attenzione agli oggetti taglienti che potrebbero danneggiarlo (unghie, gioielli...). Controllare sempre che la parte da srotolare sia all'esterno.
2. Con una mano, stringere con la dita l'estremità con il serbatoio del profilattico, in modo da espellere l'eventuale aria imprigionata (un eccesso d'aria all'interno del profilattico può aumentare il rischio di rottura).
3. Posizionare il profilattico sull'estremità del pene in erezione e, con l'altra mano, srotolarlo su tutta la lunghezza del pene fino alla base. Se il profilattico non si srotola potrebbe essere stato posizionato dal lato sbagliato. Smaltire il profilattico e prenderne un altro, in quanto potrebbe esservi già sopra dello sperma.
4. Dopo l'eiaculazione e prima del termine dell'erezione, ritirarsi tenendo il profilattico alla base del pene, per evitare di perderlo o di far uscire dello sperma. Evitare con cura qualsiasi contatto fra il pene e/o il profilattico usato e il corpo del partner.

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima dell'uso:

Non utilizzare il profilattico se è passata la data di scadenza. Indossare il profilattico solo quando il pene è in erezione e prima di qualsiasi contatto con il corpo del partner. Utilizzare solo lubrificanti raccomandati per profilattici. Non utilizzare lubrificanti a base d'olio, come lozioni corporali, oli per bambini, burro, margarina, vaselina, ecc., perché tutto ciò che contiene olio può danneggiare i profilattici in lattice. Alcuni farmaci applicati su pene o vagina possono danneggiare il profilattico; consultare il medico o il farmacista prima dell'uso. Dopo l'uso, avvolgere il profilattico in un fazzolettino di carta e smaltirlo in modo igienico (non nel wc).



SCOPRI ANCHE
SKYN® EXTRA
LUBRICATED!

SCOPRITE IL PROFILATTICO DI NUOVA GENERAZIONE,
VI SEMBRERÀ DI NON SENTIRLO

www.skyncondoms.com



Connexion s.a./n.v.

Avenue Charles Woeste 207,
B-1090 Brussels, Belgium

T. +32 (0)2 421 71 40

F. +32 (0)2 425 77 47

E. mail@connexion.eu

www.connexion.eu

CLIENT: ANSELL SWGBU

DATE: 09/04/14

COLOURS:

FILE NAME:

Akuel SKYN Flatpack - Verso - IT
PK

Process

Pantone 7403